



## STERIMAR™ HIGIENE Y BIENESTAR

**STERIMAR™ higiene y bienestar** es una solución fisiológica de agua de mar que contiene una concentración de sal de 8,7 a 10,2 g/l, similar a las células del cuerpo humano.

**STERIMAR™ higiene y bienestar** es un producto sanitario indicado en niños a partir de 3 años y adultos:

- Limpia y elimina las impurezas (polvo, mucosas, alergias ...),
- Hidrata y restaura la humedad natural de la mucosa nasal (Calefacción, aire acondicionado),
- Previene los trastornos ORL (resfriados, rinitis, sinusitis, infecciones del oído ...), reforzando las defensas de la mucosa nasal,
- Ayuda a la inducción y calidad del sueño mejorando la respiración.

Uso diario y puede ser utilizado después de la cirugía de nariz.

## STERIMAR™ Alergia

**STERIMAR™ alergia** es una solución fisiológica de agua de mar que contiene una concentración de sal de 8,7 a 10,2 g/l, similar a las células del cuerpo humano.

**STERIMAR™ alergia** es un producto sanitario indicado para bebés, niños y adultos:

- Limpia y elimina los alérgenos en contacto con la mucosa nasal (polen, partículas de contaminación, polvo, ácaros del polvo, pelo de animales...),
- Hidrata y restaura la humedad natural de la mucosa nasal,
- Previene el desarrollo de alergias.

Se recomienda en caso de alergia de la nariz, previene los estornudos, la rinorrea y la picazón.

Se recomienda el uso diario al comienzo de la temporada de alergia y en la limpieza antes de administrar tratamientos relacionados con trastornos ORL.

## STERIMAR™ Higiene y bienestar y STERIMAR™ alergia:

### CONSEJOS PARA LA UTILIZACIÓN:

*Antes del primer uso, efectuar una primera pulverización para cebar el dispositivo.*

**Higiene e hidratación de la mucosa nasal:** Con la cabeza recta, colocar la boquilla en la fosa nasal. Pulverizar una o dos veces en cada fosa nasal. Dejar que cualquier exceso de solución fluya hacia fuera y luego sonarse la nariz.

**Limpieza más profunda de las fosas nasales:** Incline la cabeza hacia un lado, introducir suavemente la boquilla en la fosa nasal superior.

Administrar una pulverización prolongada, de 2 a 3 segundos. Dejar que cualquier exceso de solución salga por el otro orificio nasal y luego sonarse la nariz.

Después de cada uso, limpiar la boquilla con agua caliente y secar.

**Aplicar de 2 a 6 pulverizaciones al día.**

## STERIMAR™ Bebé Higiene y bienestar

**STERIMAR™ Bebé Higiene y bienestar** es una solución fisiológica de agua de mar que contiene una concentración de sal de 8,7 a 10,2 g/l, similar a las células del cuerpo humano.

**STERIMAR™ Bebé higiene y bienestar** es un producto sanitario recomendado en el uso diario de bebés entre 0 y 3 años de edad:

- Limpia suavemente la nariz y elimina las impurezas,
- Hidrata y restaura la humedad natural de la mucosa nasal,
- Previene los trastornos ORL, reforzando las defensas de la mucosa nasal,
- Mejora la respiración para facilitar un buen sueño y la alimentación con biberón o lactancia.

Uso diario recomendado. Ayuda para que el proceso de aprendizaje de sonarse la nariz sea más fácil para los niños.

### CONSEJOS PARA LA UTILIZACIÓN:

*Antes del primer uso, efectuar una primera pulverización para cebar el dispositivo.*

**Higiene e hidratación de la mucosa nasal:** Colocar suavemente la boquilla en la fosa nasal. Pulverizar brevemente una o dos veces en cada fosa nasal. Dejar que cualquier exceso de solución fluya hacia fuera antes de sonarse la nariz.

**Limpieza más profunda de las fosas nasales:** Colocar la cabeza del bebé de 0 a 2 años acostado sobre su espalda o sentado a partir de 2 años de edad. Incline la cabeza del bebé hacia un lado, introducir suavemente la boquilla en la fosa nasal superior. Presionar la boquilla durante 2 segundos. Dejar que cualquier exceso de solución salga por el otro orificio nasal y luego sonarse la nariz. Repetir la operación en el otro orificio nasal, si es necesario.

Después de cada uso, limpiar la boquilla con agua y jabón y secar.

**Aplicar de 2 a 6 pulverizaciones al día.**





## Microdifusión de solución fisiológica de agua de mar 100% natural

### La clave para una buena respiración es la nariz.

La nariz y la mucosa nasal juegan un papel importante. Humidifican y calientan el aire respirado actuando como acondicionador del aire. Cuando está obstruido, la nariz ya no es capaz de llevar a cabo correctamente sus funciones reguladoras.

Además, el moco a menudo puede ser una fuente de contaminación, lo que puede dar lugar a trastornos ORL ya que es un portador de gérmenes patógenos.

Desde 1975, **STERIMAR™**, pionero de la pulverización nasal de agua de mar, ha puesto su experiencia del mar y sus recursos naturales al servicio de la salud nasal.

**STERIMAR™** es un producto sanitario utilizado y adecuado para toda la familia desde bebés hasta adultos.

Filtrada, 100% natural y sin conservantes, el agua de mar **STERIMAR™** se le han reconocido propiedades beneficiosas de sales minerales y trazas de oligoelementos marinos tales como zinc, cobre, manganeso, hierro, magnesio, selenio...

**STERIMAR™** gracias a la fina dispersión de su microdifusión, le permite lavar suavemente las cavidades nasales y facilita la absorción de oligoelementos evitando al mismo tiempo la propagación del moco.

**STERIMAR™** respeta el medio ambiente: el envase de aluminio puede ser reciclado. Su cartón es de material reciclable y su prospecto está impreso en papel ecológico sin cloro. El agua de mar se extrae de la costa Atlántica y después de comprobar la pureza fisiológica, se adecua para su uso.

#### Atención

Recipiente a presión: Puede explotar si se calienta. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, de llamas y de cualquiera otra fuente de ignición. No Fumar mientras se utiliza. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F. Mantener fuera del alcance de los niños.

REIG  JOFRE

 **SOFIBEL - Laboratoires Fumouze**  
110-114 rue Victor Hugo  
92686 Levallois-Perret Cedex - Francia

Comercializado en España por:  
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.  
Gran Capitán, 10  
08970 Sant Joan Despí Barcelona



[www.sterimar.com](http://www.sterimar.com)

R 02-2017

104358/1



**DESCONGESTIÓN**

## **STÉRIMAR™ CONGESTIÓN NASAL**

### **COMPOSICIÓN:**

**STÉRIMAR™ Congestión Nasal es una solución hipertónica de agua de mar\*\*\*** cuya concentración salina es superior a la de las células del cuerpo humano y descongestiona activamente la nariz mediante un proceso de ósmosis. El agua de mar de **STÉRIMAR™**, filtrada, **100% natural y sin conservantes** presenta propiedades beneficiosas de **sales minerales y trazas de oligoelementos marinos y contiene cantidades adicionales de cobre y manganeso.**

**STÉRIMAR™ Congestión Nasal** es un producto sanitario recomendado para niños a partir de 3 años de edad y adultos en casos de resfriados, rinitis y sinusitis aguda o crónica para:

- ◆ **Descongestionar rápidamente la mucosa nasal**
- ◆ **Eliminar incluso la mucosidad espesa.**
- ◆ **Ayudar a combatir** resfriados y sinusitis y **reducir el riesgo** de infecciones secundarias al limpiar las fosas nasales\*
- ◆ **Prevenir** la infección por gripe\*\*
- ◆ **Mejorar la eficacia** de los tratamientos médicos locales para reducir la necesidad de administración.

### **RECOMENDACIONES DE USO:**

Antes del primer uso, efectuar una primera pulverización para cebar el dispositivo.

Con la cabeza recta, colocar la boquilla en la fosa nasal. Pulverizar una o dos veces en cada fosa nasal.

Dejar que cualquier exceso de solución salga por el otro orificio nasal y luego sonarse la nariz.

Limpieza más profunda de las fosas nasales: Incline la cabeza hacia un lado, introducir la boquilla hasta la parte superior de la fosa nasal.

Pulverice entre 2 y 3 segundos. Dejar que cualquier exceso de solución salga por el otro orificio nasal y luego sonarse la nariz .





**DESCONGESTIÓN**

### **Microdifusión de solución fisiológica de agua de mar 100% natural**

La nariz y la mucosa nasal juegan un papel importante. Humidifican y calientan el aire respirado actuando como acondicionador del aire. Cuando la nariz está demasiado seca u obstruida, ya no es capaz de llevar a cabo correctamente sus funciones reguladoras.

Además, las mucosidades a menudo pueden ser una fuente de contaminación, lo que puede dar lugar a afecciones ORL ya que es portador de gérmenes patógenos.

Desde 1975, **STÉRIMAR™**, pionero en higiene nasal, ha puesto sus conocimientos del mar y sus recursos naturales al servicio de la salud nasal. **STÉRIMAR™** es un producto sanitario utilizado y adecuado para toda la familia, desde bebés hasta adultos.

¿Por qué **STÉRIMAR™**? En primavera, la nariz es a menudo más sensible a las agresiones de los alérgenos tales como: polen, contaminación atmosférica (picos de ozono), polvo doméstico (ácaros), pelos de animales... Por ello un lavado de nariz con **STÉRIMAR™** es particularmente adecuado.

Se puede utilizar en todas las posiciones con total seguridad. Su específico aplicador anatómico es adecuado tanto para las pequeñas fosas nasales de los lactantes como las del adulto.

Filtrada, 100% natural y sin conservantes, el agua de mar **STÉRIMAR™** se le han reconocido propiedades beneficiosas de sales minerales y trazas de oligoelementos marinos tales como zinc, cobre, manganeso, hierro, magnesio, selenio...

**STÉRIMAR™** gracias a la fina dispersión de su microdifusión, le permite lavar suavemente las cavidades nasales, permite un prolongado tiempo de contacto de la solución de agua de mar con la mucosa nasal y facilita la absorción de oligoelementos marinos, incluyendo manganeso, evitando al mismo tiempo la propagación del moco.

**STÉRIMAR™** respeta el medio ambiente: el envase de aluminio puede ser reciclado. Su cartón es de material reciclable y su prospecto está impreso en papel ecológico sin cloro. El agua de mar se extrae de la costa Atlántica y después de comprobar la pureza fisiológica, se adecúa para su uso.

Agua de mar: 75 ml - Sal de cobre pentahidratada - Sal de manganeso monohidratada

Envase de 100ml con 300 dosis aproximadamente.

Envasado asépticamente. Contenedor presurizado con gas propelente inerte (nitrógeno). La solución se mantiene dentro de un recipiente interior y no entra en contacto con el nitrógeno.

#### **Atención**

Recipiente a presión. Puede explotar si se calienta. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/ 122°F. Mantener fuera del alcance de los niños.



**REIG JOFRE**

**SOFIBEL - Laboratoires Fumaze**  
110-114 rue Victor Hugo  
92686 Levallois-Perret Cedex - Francia

Comercializado en España por:  
Laboratorio Reig Jofre, S.A.  
Gran Capitán, 10  
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

100ml e



108203/1

0459

[www.sterimar.com](http://www.sterimar.com) R 05-2021



## SINUSITIS NARIZ MUY CONGESTIONADA

La marca STÉRIMAR™ extrae su agua de mar en la bahía de Cancale (Bretaña-Francia), un paraje excepcional, protegido y reputado por su calidad medioambiental.

### ¿Qué es la sinusitis?

La rinosinusitis, muchas veces designada bajo el término de «sinusitis», es una inflamación de los senos paranasales – son cavidades llenas de aire repartidas por los huesos del rostro (alrededor de los ojos) y por la base del cráneo – y de la mucosa nasal. Se distinguen dos tipos de rinosinusitis: la rinosinusitis bacteriana aguda (que dura entre 10 y 14 días) y la rinosinusitis crónica (duración mínima de 12 semanas). La rinosinusitis es una de las afecciones respiratorias más detectadas durante el invierno. La infección alcanza la mucosa nasal que se irrita y se hincha, obstruyendo así los senos paranasales. Cuando normalmente las secreciones son drenadas por la nariz, en este caso no consiguen evacuarse. Su estancación favorece la multiplicación de los microorganismos, lo cual provoca un aumento de la presión a nivel de los senos. Dicha patología se produce a menudo después de una rinoфарingitis.

**STÉRIMAR™ Sinusitis Nariz Muy Congestionada es un producto sanitario.**

A base de **agua de mar 100% natural** enriquecida con aceite esencial de *Eucalyptus Globulus*, STÉRIMAR™ Sinusitis Nariz Muy Congestionada es una solución hipertónica (concentración en sal superior a la de las células del cuerpo humano), lo que permite **descongestionar la mucosa nasal por efecto de osmosis.**

Recomendado en niños desde los 6 años y adultos en caso de constipado, rinitis y sinusitis aguda o crónica para:

- **Descongestionar la nariz en menos de un minuto\*.**
- **Fluidificar y eliminar las mucosidades, incluso si son espesas.**
- **Combatir los síntomas del constipado y aliviar la rinosinusitis.**
- **Calmar rápidamente.**

**Una vez descongestionada y saneada la nariz, notará alivio y sensación de frescor. Recupera así todo el confort de una respiración liberada.**

*\* El 63% de los pacientes constataron la descongestión en menos de un minuto. Valoración desde los primeros 7 días del tratamiento.*

### SEGURIDAD

#### Frasco anticontaminación:

- ✓ Su sistema válvula antirreflujo evita cualquier contaminación de la solución, incluso después de la apertura para una **fórmula preservada al 100%.**
- ✓ Su práctico formato de 20 ml se puede meter en el bolsillo para permitir una utilización en cualquier circunstancia.

## COMPOSICIÓN

Agua de mar 75 ml • Hialuronato de sodio  
• Caprill/Capril glucósido • Aceite esencial de  
Eucaliptus Globulus • Sulfato de cobre  
• Sulfato de manganeso • Agua purificada  
cs 100 ml

Envasado asépticamente.

## CONSEJOS PARA LA UTILIZACIÓN

Sonar la nariz, una fosa nasal tras otra.

- ▶ Agitar el frasco.
- ▶ Quitar la tapa protectora.
- ▶ En la primera utilización, y si es necesario, efectuar entre una y tres pulverizaciones para cebar el sistema, estando el frasco en posición vertical, el aplicador de pulverización orientado hacia arriba.
- ▶ Mantener el frasco verticalmente, luego introducir el aplicador en la fosa nasal, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el lado de la fosa nasal donde haya que pulverizar la solución.
- ▶ Proceder con dos pulverizaciones, inspirando suavemente.
- ▶ Repetir la operación en la otra fosa nasal.
- ▶ Dejar actuar la solución unos minutos sin sonarse la nariz.
- ▶ Dejar escurrir el excedente de solución, secar la nariz, luego sonarse si hace falta.
- ▶ Limpiar el aplicador con agua caliente jabonosa y secar antes de volver a posicionar la tapa protectora.

Desaconsejado en caso de hipersensibilidad a uno de los componentes.

Desaconsejado si la mucosa no está congestionada.

**Desaconsejado en mujeres embarazadas o que amamantan.**

En caso de mucosa irritada, se pueden producir sensaciones de cosquilleo durante la utilización.

En caso de duda, pida consejo a su farmacéutico o consulte a su médico de cabecera o a un otorrinolaringólogo.

Conservar a temperatura ambiente.

Distribuido y comercializado en España por:  
Laboratorio Reig Jofre S.A.  
Gran Capitán, 10  
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

REIG  JOFRE

 **SOFIBEL** - Laboratoires Fumouze  
110-114, rue Victor Hugo  
92686 Levallois-Perret Cedex - FRANCE

 **LABORATOIRES  
FUMOUCZE**

[www.sterimar.com](http://www.sterimar.com)



20 ml e



